


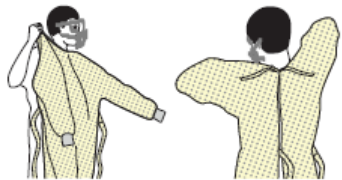
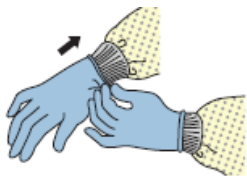










An- und Ablegen von Schutzkleidung (PSA)

Schritt	Anlegen		
1		Händedesinfektion	
2		Mund-Nasen-Schutzmaske (MNS) oder FFP-2-/3-Atemschutzmaske aufsetzen	<u>Bei MNS:</u> ■ Nasenbügel anmodellieren <u>Bei FFP-Atemschutzmaske:</u> ■ Unteres Gummi hinter den Nacken ■ Oberes Gummi über die Ohren ■ Dichtsitz prüfen!
3		Schutzbrille aufsetzen	
4		Schutzkittel anziehen	Hinten dicht verschließen
5		Handschuhe anziehen	Stulpen über das Bündchen ziehen
Schritt	Ablegen		
1		Handschuhe ausziehen	Den ersten Handschuh möglichst nur an der Handschuhfläche abziehen
2		Händedesinfektion	

3		Kittel ausziehen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bei vorgesehener Wiederbenutzung: Aufbewahrung so, dass Innenseite und Umgebung nicht kontaminiert werden
4		Händedesinfektion	
5		Mund-Nasen-Schutzmaske oder FFP-2-/3-Atemschutzmaske absetzen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bei vorgesehener Wiederverwendung sicherstellen, dass Innenseite nicht berührt wird; ■ Aufbewahrung so, dass Innenseite und Umgebung nicht kontaminiert werden
6		Händedesinfektion	
7		Schutzbrille absetzen	<ul style="list-style-type: none"> ■ Nach Ablegen Wischdesinfektion der Brille
8		Händedesinfektion	

Bildquelle: 